

## الکتروکاردیوگراف ۳۰۱۰ Biocare

### شرکت نمایندگی: داهیان

- ۱ - پوار و دستبند ها را به درستی به بیمار متصل کنید.
- ۲ - قبل از اتصال پوار و دستبندها محل اتصال را تمییز کرده و حتما از ژل استفاده نمایید
- ۳ - کلید ON/OFF: روشن و خاموش کردن دستگاه توسط این کلید انجام می گیرد
- ۴ - کلیدهای کنترلی زیر بر روی پانل اصلی دستگاه موجود است  
الف) ←SPEED/CH: به وسیله این کلید اپراتور بسته به نوع بیمار و توصیه پزشک سرعت حرکت کاغذ را انتخاب می نماید . سرعت می تواند یکی از مقادیر 6.25، 12.5، 25 و یا 50 میلیمتر در ثانیه تغییر کند.  
ب) ◀▶LEAD: برای تغییر لیدهای ECG مورد استفاده قرار می گیرند.  
پ) ←0→: برای Reset کردن موج ECG به کار می رود.  
ث) ←: این کلید برای ورود به منوهای مختلف دستگاه به کار می رود.  
ح) CH / : این کلید در مدل فوق غیرفعال می باشد.  
ه) []: به وسیله این کلید یک سیگنال به اندازه 1mv برای تست خروجی دستگاه ایجاد می گردد.  
و) O: این کلید برای تغییر mode دستگاه (Manual, Auto) به کار می رود.  
ن) : به وسیله این کلید دامنه سیگنال نمایش داده شده می تواند به یکی از مقادیر 2.5، 5، 10 و یا 20 میلیمتر در میلی ولت تغییر کند. همچنین در منوهای مختلف دستگاه این کلید برای بازگشت به منوی قبلی به کار می رود.  
ه) □: این کلید برای مشاهده منوهای مختلف دستگاه و انجام تنظیمات مختلف به کار می رود.  
ی) Record: برای ضبط کردن سیگنال بر روی کاغذ ECG از کلید سبز رنگ استفاده می شود . با فشار دادن مجدد کلید فوق پرینت متوقف می گردد.



جهت اطلاعات بیشتر به راهنمای کاربری دستگاه مراجعه نمایید



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران