



## الکتروکار دیوگراف FUKUDA San-ei

### شرکت نمایندگی:

- ۱-سیم دستگاه به برق متصل گردد.
- ۲-کابل ها بدرستی به بیمار متصل گردد.
- ۳-از ژل الکتروولیت هنگام اتصالات به بدن استفاده گردد.
- ۴-سیم ارت دستگاه را به پایه ی فلزی تالی یا به لوله کشی فلزی آب متصل کنید.
- ۵-کلید On/Off (در سمت راست دستگاه) روشن شود.
- ۶-سمت چپ بالای دستگاه کلید OPR فعال گردد.
- ۷-فیلترهای دستگاه را فعال نموده(چراغهای فیلتر روشن گردد).
- ۸-سرعت (Speed) روی عدد ۲۵ mm/s باشد.
- ۹- Sensitivity (دامنه ی ولتاژ) ، روی عدد ۱ قرارگیرد.
- ۱۰-یکی از گزینه های Man (دستی) یا Auto (اتوماتیک) برای گرفتن نوار انتخاب کنید:  
\_در صورتیکه روی Auto باشد، کلید Operating روی Start تنظیم کرده سپس کلیه ی لیدها به طور اتوماتیک گرفته میشود .  
\_در صورتیکه روی Man باشد با کلید lead Select لیدهای موردنظر انتخاب شود.
- ۱۱-پس از اتمام کار با کلید Operating ، Stop کرده و بهینت قطع میگردد.

جهت اطلاعات بیشتر به راهنمای کاربری دستگاه مراجعه نمائید



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران