


## الکتروکاردیوگراف INNOMED

نماینده انحصاری: شرکت جهان گسترش تجارت ، تلفن: ۸۸۷۷۷۷۴۷

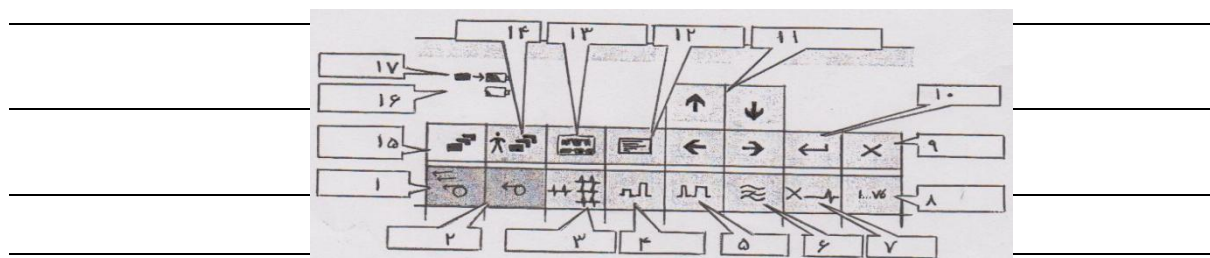


- ۱ پرینت اتوماتیک: با یک بار فشار دادن این کلید هر ۱۲ لید بصورت اتوماتیک پرینت گرفته می شود.
- ۲ پرینت دستی: با یک بار فشردن کلید، پرینت گرفته می شود و با زدن مجدد پرینت قطع می شود.
- ۳ انتخاب بین پرینت یک کاناله و پرینت سه کاناله
- ۴ انتخاب دامنه: که بین ۰/۲۵ ، ۰/۵ ، ۱ و ۲ برابر قابل تنظیم است که استاندارد آن ۱ می باشد.
- ۵ انتخاب سرعت: که بین ۵ ، ۲۵ و ۵۰ میلیمتر بر ثانیه قابل تنظیم است که استاندارد آن ۲۵ می باشد.
- ۶ انتخاب فیلترهای دستگاه:  $\nabla$  نشاندهنده فیلتر برق شهر و  $\setminus$  نشاندهنده فیلتر عضلات است که برای گرفتن نوار قلب هر دو فیلتر  $\setminus \nabla$  باید روشن و فعال باشد.
- ۷ کلید توقف دستی که با زدن این کلید، گرفتن نوار متوقف می شود.
- ۸ جهت انتخاب یک لید مورد نظر بین ۱۲ لید
- ۹ کلید انصراف
- ۱۰ کلید تایید
- ۱۱ کلیدهای انتخاب جهت انجام تنظیمات دستگاه
- ۱۲ منوی تنظیمات دستگاه
- ۱۳ حالت مانیتورینگ
- ۱۴ نمایش حافظه دستگاه

۱۵ کلید اجرای برنامه

۱۶ نشانگر دشارژ شدن باتری

۱۷ نشانگر شارژ شدن باتری

### اطلاعات صفحه نمایش دستگاه

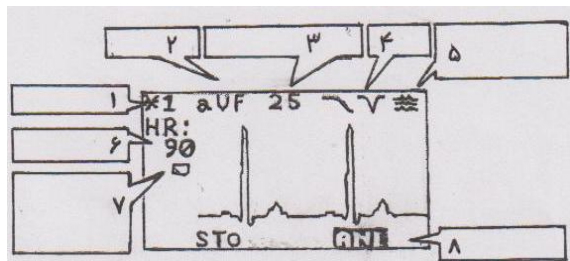

۱ نمایش دامنه انتخاب شده توسط کلید شماره ۴

۲ نمایش لید انتخاب شده توسط کلید شماره ۸

۳ نمایش سرعت انتخاب شده توسط کلید شماره ۵

۴ نمایش فیلتر های فعال شده دستگاه توسط کلید شماره ۶

۵ نمایش یک کاناله یا سه کاناله بودن دستگاه توسط کلید شماره ۳

۶ نمایش ضربان قلب

۷ نشانگر وضعیت باتری دستگاه

۸ انتخاب بین برنامه های ذخیره شده ECG در حافظه STO و آنالیزی ANL

نکات قابل توجه درباره باتری دستگاه :

باتری شارژ کامل	نشانگر سبز مداوم
نشاندهنده شارژ شدن باتری	نشانگر سبز چشمک زن
نشاندهنده کم بودن شارژ باتری و نیاز به شارژ	نشانگر زرد چشمک زن
دشارژ شدن کامل باتری و نیاز به شارژ شدن حداقل به مدت ۸ ساعت	نشانگر زرد مداوم

تذکر مهم: در صورتی که باتری دستگاه کاملاً تخلیه شده باشد، باید دستگاه حداقل بمدت یک ساعت شارژ شود

تا بتوان از پرینتر آن استفاده کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید .



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران