

## Medin مارک NCPAP



- ۱- منابع اکسیژن و هوا را به منبع مرکزی ( دیواری ) وصل شود .
- ۲- آب مقطر استریل در مرطوب و گرم کننده هوا و اکسیژن ( Humidifie ) ریخته شود .
- ۳- مرطوب و گرم کننده هوا و اکسیژن را روشن نماید.
- ۴- کسر اکسیژن هوای دمی (FiO2) براساس دستور پزشک تعیین شود.
- ۵- لوله بلند را به اکسی هود مناسب برای نوزاد وصل کنید.
- ۶- در صورت نیاز از اکسیژن آنالایزر برای FiO2 دریافتی نوزاد استفاده شود.
- ۷- از پالس اکسی متر برای پایش اشباع اکسیژن خون شریانی استفاده کنید .
- ۸- اشباع اکسیژن خون شریانی در هیچ زمانی بیش از ۹۵% نشود.
- ۹- وضعیت نوزاد را از نظر میزان اکسیژن دریافتی و پاسخ به تجویز اکسیژن ارزیابی کنید .
- ۱۰- در صورت نیاز نوزاد به درصد بیشتر اکسیژن اطلاع داده شود .
- ۱۱- نوزاد را از نظر قلبی و تنفسی به دقت ارزیابی کنید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران