



سازت دانشگاه علوم پزشکی تهران

پ ماشین بیهوشی Dameca

- ✓ شلنگ اکسیژن را به اکسیژن سانترال یا کپسول وصل نموده دو شاخه را به برق بزنید .
- ✓ لوله شماره ۱ لوله دم، لوله شماره ۲ لوله بازدمی و لوله شماره ۳ لوله متصل به بگ می باشد آنها را به دستگاه وصل کنید . اکسیژن را باز کرده تمام دریچه ها را ببندید و LEAK دستگاه را چک کنید.
- در صورتیکه بخواهیم از ونتیلاتور استفاده کنیم :
- ✓ الف : دکمه سبز روی دستگاه را روشن کرده از اولین عقربه سمت چپ **volume** ، حجم تنفس را روی دستگاه تنظیم کنید .
- ✓ با عقربه دوم **Breaths/Min** تعداد تنفس را مشخص می کنیم .
- ✓ سطح سبز رنگ **Pressurs** نشان **Peep** و **Peak** راه هوایی می باشد که با تغییر دکمه های سمت راست و چپ میزان آنها را تنظیم می کنیم .
- ✓ با دکمه پایین، **ON/ STBY** دستگاه را در حالت **Standby** تنظیم نموده و برای استفاده آماده نمایید.
- ✓ سه دکمه بعدی **I:E** ، غالباً روی ۱:۲ تنظیم می شود.
- ✓ دکمه بعدی اشکالات دستگاه را نشان می دهد .
- ✓ دکمه **Alarm** نیز برای خاموش کردن آلارم دستگاه می باشد .



سازمان دانشگاه علوم پزشکی تهران



جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران