


پالس اکسی متر 520A , NOVAMATRIX MARS2001

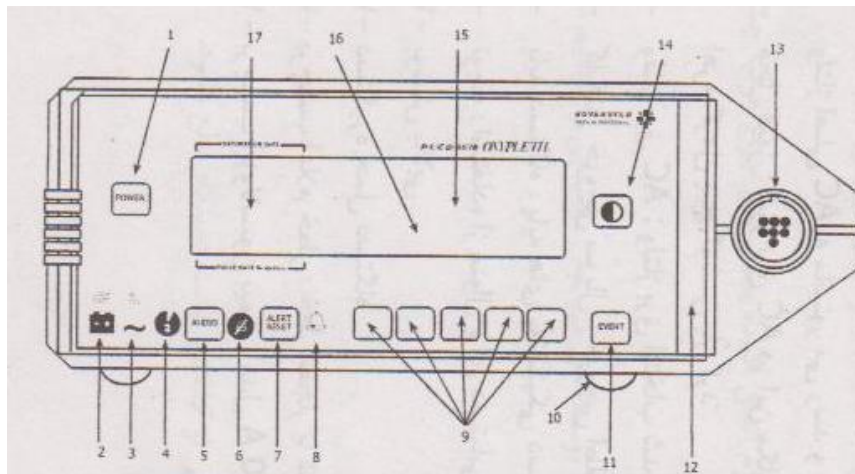

- ۱ **دکمه POWER**: با فشار دادن این دکمه مانیتور روشن می گردد.
- ۲ **LOW BATTERY**: نشاندهنده وضعیت باتری است. در حالیکه مانیتور از باتری استفاده می کند این دکمه قرمز می باشد و زمانیکه ولتاژ باتری کاهش یابد بصورت چشمک زن خواهد بود.
- ۳ **AC/ON**: نشان دهنده استفاده از برق شهر می باشد. در این حالت چراغ سبز روشن خواهد بود.
- ۴ **🔊**: نشان دهنده قطع آلارم صوتی به مدت دو دقیقه خواهد بود. در صورتیکه دکمه **AUDIO** فشار داده شود، این نشاندهنده نور زرد رنگ از خود ساطع می کند و آلارم را به مدت ۲ دقیقه به حالت قطع می برد.
- ۵ **دکمه آلارم**: با فشار این دکمه، آلارم صوتی به مدت دو دقیقه قطع می گردد. در ضمن با فشار این دکمه و نگه داشتن آن به مدت ۲۰ ثانیه، آلارم به طور دائم قطع خواهد شد و چراغ **AUDIO OFF** فعال میگردد و با دو بار فشار دادن این دکمه، آلارم مجدداً فعال خواهد شد.
- ۶ **AUDIO OFF**: در زمانیکه آلارم غیر فعال شده باشد، این نشاندهنده به صورت چشمک زن عمل می نماید.
- ۷ **ALERT RESET**: با فشار این دکمه، نشاندهنده آلارم غیر فعال می گردد و چنانچه آلارم هنوز وجود داشته باشد، نشان دهنده دوباره فعال می گردد.
- ۸ **نشانگر آلارم**: وقتی آلارم اتفاق بیافتد این نشان دهنده به رنگ قرمز چشمک می زند و این عمل تا زمانی که **ALERT RESET** را نزنیم ادامه می یابد.
- ۹ **کلید های نرم افزاری**: که عمل هر کدام در بالای آن کلید روی صفحه نمایش مانیتور نوشته شده است و با تغییر منو عملکردهای آن ها نیز تغییر می یابد.



سازت دانه انگاه علوم پزشکی تهران

- ۱۰ پایه مانیتور
- ۱۱ **EVENT** : با فشار این کلید میتوان وقایع رخ داده روی نمایشگر را برای بررسی (TREND) علامت گذاری نمود.
- ۱۲ ستون قرمز آلام
- ۱۳ محل اتصال کاتکتور SPO2 به دستگاه
- ۱۴ **کنتراست تصویر**: این دکمه مربوط به روشنایی صفحه تصویر مانیتور میباشد و بوسیله آن میتوان روشنایی را تنظیم نمود.
- ۱۵ **محل نمایش شکل موج و TREND**
- ۱۶ **محل منوهای دکمه های نرم افزاری (۹)** را مشخص می نماید

مخصوص پالس اکسی متر مدل MARS2001

Infant Mode

مد نوزادان: انتخاب این مد به پالس اکسی متر مدل ۲۰۰۱ این اجاره را می دهد تا خود را با شرایط نوزادان و اطفال کوچکتر با ضربان قلب بیش از ۱۰۰ در دقیقه تطابق دهد.

توجه: هیچگاه از این مد برای بیماران بزرگسال یا اطفال با ضربان قلب کمتر از ۱۰۰ در دقیقه استفاده ننمایید.

فعال کردن یا کنسل کردن Infant Mode

- ۱ دکمه نرم افزاری MENU را فشار دهید.
- ۲ دکمه نرم افزاری TYPE را فشار دهید تا SET Infant Mode ظاهر گردد.
- ۳ ON را انتخاب نموده تا Infant Mode فعال گردد. OFF را انتخاب نمایید تا Infant Mode غیرفعال گردد.
- ۴ دکمه نرم افزاری RUN را فشار دهید تا به صفحه منوی اصلی باز گردد.
- ۵ هنگامی که Infant Mode فعال می گردد یک پیام نوشتاری **INFANT** در صفحه نمایش زیر قسمت SPO2 ظاهر میگردد.

جهت اطلاعات بیشتر به راهنمای کاربری دستگاه مراجعه نمایید



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران