

## پالس اكسى متر OXYPLETH

- ۱ ( اتصال دستگاه به برق شهر ( قبل از روشن كردن دستگاه بايد فيوز را در محل مناسب يعنى **230 V** قرار داد )
  - ۲ ( روشن كردن دستگاه از طريق كليل **POWER**
  - ۳ ( يك بار صداى **Beep** نشان دهنده فعال بودن صداى دستگاه است .
  - ۴ ( دكله **Contrast** را فشار دهيد تا صفحه نمايش براى ديد مطلوب تنظيم شود .
  - ۵ ( براى پاك كردن اطلاعات **Trend** دكله **Yes** را فشار دهيد و براى ذخيره كردن اطلاعات قبلى دكله **No** را فشار دهيد
  - ۶ ( **AUDIO OFF** : در زمانيكه آلارمى اتفاق افتاده باشد ، اين نشان دهنده به صورت چشمك زن عمل مى كند .
  - ۷ ( **ALERT RESET** : با فشار اين دكله نشان دهنده آلارم غير فعال مى گردد و چنانچه آلارم هنوز وجود داشته باشد نشان دهنده دوباره فعال مى گردد .
  - ۸ ( **EVENT** : بوسيله فشار دادن اين كليل مى توان وقايع رخ داده در روى **DISPLAY** را براى بررسى **Trend** علامت گذارى نمود .
- نكات : الف ( زمانيكه دستگاه مرطوب است از آن استفاده نكنيد .
- ب ( كابل سنسور نبايد كشيده شود.
- ج ( مانيتور و سنسورهاي آن نبايد در دماى كمتر از  $10^{\circ}\text{C}$  - يا بيشتر از  $55^{\circ}\text{C}$  نگه داشته شود .



جهت اطلاعات بيشتر به راهنماى كاربرى دستگاه مراجعه نماييد



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران