


پمپ سرم Arcomed

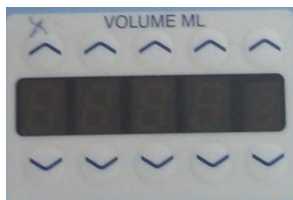

تبدیل مایکروست به میکروست و بالعکس


جهت تبدیل میکروست به مایکروست یا بالعکس اولین دکمه سمت بالا چپ (علامت زده شده) را نگه داشته سپس دستگاه را روشن نمایید. در این حالت اگر دستگاه قبلاً روی ۲۰ قطره (ماکرو) تنظیم شده باشد، با اینکار به ۶۰ قطره (میکرو) تبدیل می شود.

نصب قطره شمار: قطره شمار می بایست بر روی چمبر ست در فضای خالی بین قطره چکان و مایع سرم نصب گردد، بطوریکه سنسور آن همسطح سوزن چمبر باشد.

نصب ست سرم: ابتدا سوکت سنسور قطره را به پشت دستگاه وصل می نمایم. سپس دستگاه را روشن نموده و دو ضامن دو طرف دستگاه را باز کرده و ست سرم را در جهت مشخص شده جایگذاری کنید. دقت شود که ست سرم می بایست بصورت کاملاً کشیده رد شود تا حباب نداشته باشد. در این حالت دستگاه شروع به شناسایی set کرده و قسمت Rate چشمک زن می شود.

RATE

راه اندازی

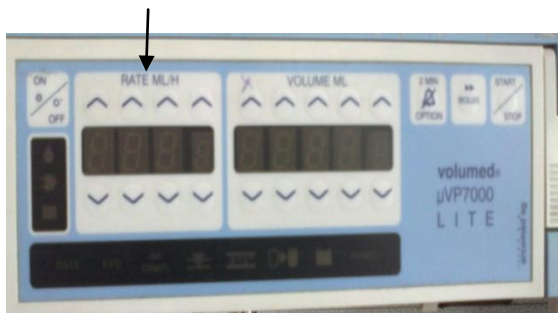

تنظیمات تزریق می بایست در حالت STOP انجام شود. در پنجره Rate سرعت تزریق دستور داده شده را وارد و دکمه استارت را می زنیم. در این حالت دستگاه تا خالی شدن Bag سرم، تزریق را ادامه می دهد، در صورتی که حجم خاصی از حجم کل Bag سرم مورد نظر باشد، علاوه بر اینکه مراحل ذکر شده در مورد Rate باید انجام پذیرد، در پنجره حجم (Volume) عدد

مورد نظر را وارد نموده، سپس دکمه Start را می زنیم. در این حالت دستگاه پس از تزریق حجم ذکر شده، در پنجره (Volume) به حالت STOP در می آید. در صورت کارکرد صحیح، علامت قطره در سمت چپ دستگاه چشمک می زند. این دستگاه قابلیت تزریق سریع (Bolus-free) را در حالت Manual دارا می باشد. برای این کار در حین اینکه دستگاه در حال کار است، دکمه های Bolus و Option را همزمان فشار داده، تا زمانیکه دکمه ها نگه داشته شوند عمل Bolus انجام می پذیرد.



سازمان بهداشت و آموزش پزشکی ایران


Min ۲
△
Option

برای ALARM Silence به مدت دو دقیقه استفاده می گردد.

همچنین با هر بار فشار دادن این دکمه زمان تزریق ، حجم تزریق شده، حجم کل خواسته شده و فشار داخل extension

نشان داده می شود.

آلارمها :

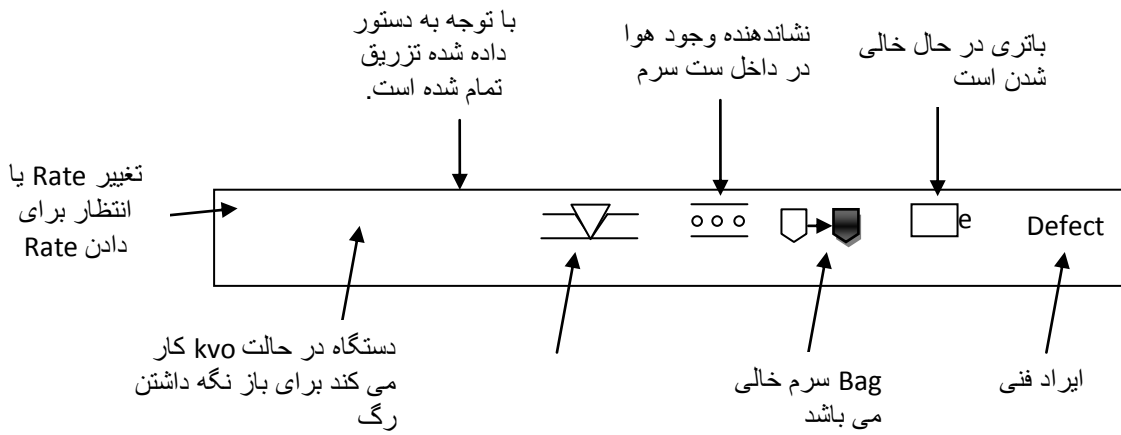

جهت اطلاعات بیشتر به راهنمای کاربری دستگاه مراجعه نمایید



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران