

پمپ سرم JMS OT-601, OT-701

نصب قطره شمار



قطره شمار می بایست بر روی چمبر ست، در فضای بین قطره چکان و مایع سرم نصب شود بطوریکه هم سطح سوزن چمبر باشد.

کلمپ ست

نصب ست سرم


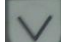
(۱) در ابتدا کلمپ ست را در جهت فلش به طرف چپ بکشید.

(۲) ست را از مسیری که مشخص شده رد کنید و دقت داشته باشید که ست می بایست به صورت (S) شکل خم شود.

تنظیم Adjust

تنظیمات می بایست در حالت stop دستگاه انجام شود.

(۳) کلید Adjust را فشار دهید. سپس نشانگر Adjust Mode چشمک زن می شود.

(۴) از کلیدهای  و  برای وارد کردن مقدار تنظیمات استفاده نمایید. (محدوده تنظیمات تا مقدار $\pm 30\%$)

(۵) دکمه Set را فشار دهید. زمانی که عدد وارد شده ثابت شد، نشانگر (Adjustment Mode) ثابت می شود. برای نمونه می توانید از جدول زیر برای تنظیمات استفاده نمایید:

Solution Type	Adjustment Range
Standard	0%
Dextrose	Abt. +5%
Dextrose(50%)	Abt. +10%
TPN Solution	Abt. +5~10%
TPN + FAT-	Abt. +10~20%



سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

- ✓ زمانی که چراغ آلام با بوق مداوم روشن می شود، می بایست دستگاه را خاموش کرده و دوباره روشن کنید
- ✓ اگر این وضعیت دوباره اتفاق بیفتد، لطفا با واحد خدمات پس از فروش شرکت تدا تماس بگیرید.
- ✓ زمانی که چراغ آلام با بوق متناوب چشمک زن می شود، می بایست کلید stop را برای قطع آلام فشار داده ، دستگاه را خاموش کنید و پس از رفع ایراد ، دستگاه را مجددا روشن کنید

علامت آلام	علایم وابسته	دلایل احتمالی
AIR	----	هوا در مسیر ست وارد شده است
DOOR	----	درب پمپ باز است
OCCL.	----	در مسیر تزریق انسداد ایجاد شده است
LOW BATT.	----	ولتاژ باتری کم است
EMPTY	----	مخزن محلول خالی شده است
DRIP	علامت "۱" چشمک میزند	اختلال در قطره شمار ایجاد شده است
	علامت "۲" چشمک میزند	نصب نادرست ست سرم در محل های مشخص شده
	علامت "۳" چشمک میزند	
	علامت "۴" چشمک میزند	استفاده ست سرم غیر استاندارد مربوط به پمپ OT-701
	علامت "۵" چشمک میزند	
	علامت "۶" چشمک میزند	هدر رفتن مایع تزریق
	علامت "۷" چشمک میزند	قسمت Finger Cassette کثیف می باشد
*	علامت "۸" چشمک میزند	قسمت Tube Cassette نصب نشده است
*	علامت "۹" چشمک میزند	قسمت Finger Cassette نصب نشده است
*	علامت "۱۰" چشمک میزند	قطره شمار نصب نشده است
----	علامت Flow Indicator چشمک میزند	عمل تزریق قطع شده است
----	علامت VOL. INFUSED چشمک میزند	عمل تزریق تمام شده است

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران