

پمپ سرم Atom

روش کار:

- ۱- دستگیره روی در دستگاه را به سمت خود بکشید تا در دستگاه باز شود
 - ۲- گیره فلزی را به سمت چپ بچرخانید و شلنگ را در مسیر خود قرار دهید
 - ۳- در را بسته و دستگیره سبز را به جای خود برگردانید
 - ۴- دکمه پاور دستگاه را زده و میزان ریت و حجم را توسط کلید های سبز بالا و پایین تنظیم کنید
 - ۵- در صورت وجود حباب دکمه prime را بزنید
 - ۶- برای توقف یا شروع مجدد تزریق دکمه infuse/standby را بزنید
 - ۷- برای قطع آلارم کلید silence را فشار دهید
- آلارم های دستگاه:

هوا در مسیر : رفع توسط کلید prime

باز بودن در: بستن در به طریق صحیح

کم بودن باتری: اتصال به برق شهر جهت شارژ باتری

انسداد: رفع انسداد در مسیر تزریق



جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران