



سازمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سرنگ پمپ TOP 5300

- ۱ - با فعال کردن کلید (OFF – ON) دستگاه به طور اتوماتیک کلیه مدارهای داخلی را چک می‌کند.
 - ۲ - سرنگ آماده شده را روی شکاف مربوطه قرار دهید.
 - ۳ - گیره نگه دارنده بدنه سرنگ را به سمت پایین حرکت دهید.
 - ۴ - گیره پیستون سرنگ را رها کنید.
 - ۵ - پانل شماره ۲ سایز سرنگ را نشان می‌دهد با زدن کلید SET اگر سرنگ دارای سطح استاندارد مشخصی باشد روی پانل شماره ۲ نوع استاندارد را نمایش می‌دهد و همزمان روی پانل شماره ۱ کد ۰.۰ را نشان می‌دهد.
 - ۶ - اگر با زدن دکمه SET دستگاه روی پانل شماره (۱) کلمه مسدود بودن (CLAMP) را درج کرد:
الف: سرنگ قبل از روشن شدن دستگاه جا گذاشته شده، باید توجه نمود حتماً بعد از روشن نمودن دستگاه و چک شدن مدارها بصورت اتوماتیک توسط خود دستگاه سرنگ را جا گذاری کنید.
ب: نوع استاندارد سرنگ مربوطه با کالیبره دستگاه سازگار نیست.
- توجه:**
- ✓ مقدار حجم تزریق از حداقل ۰/۱ در ساعت شروع و تا حد اکثر ۱۵۰۰ در ساعت قابلیت تنظیم دارد.
 - ✓ این دستگاه مجهز به باتری است، به منظور جلوگیری از خراب شدن باطری لازم است هفته ای یکبار پس از آنکه با وصل شدن دستگاه به برق AC باتری را به مدت ۱۷ ساعت شارژ گردید، دستگاه را از برق کشیده و فقط از باتری برای کار با دستگاه استفاده کنید . این عمل را چنانچه می خواهید از دستگاه برای یک مدت طولانی استفاده نکنید هر سه ماه یکبار را انجام دهید.
 - ✓ از پر کردن سرنگ‌های 50 cc بیش از ظرفیت آنها خودداری کنید چرا که ممکن است سرنگ در محل خود بطور کامل قرار نگیرد.



جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران