


سرنگ پمپ Arcomed

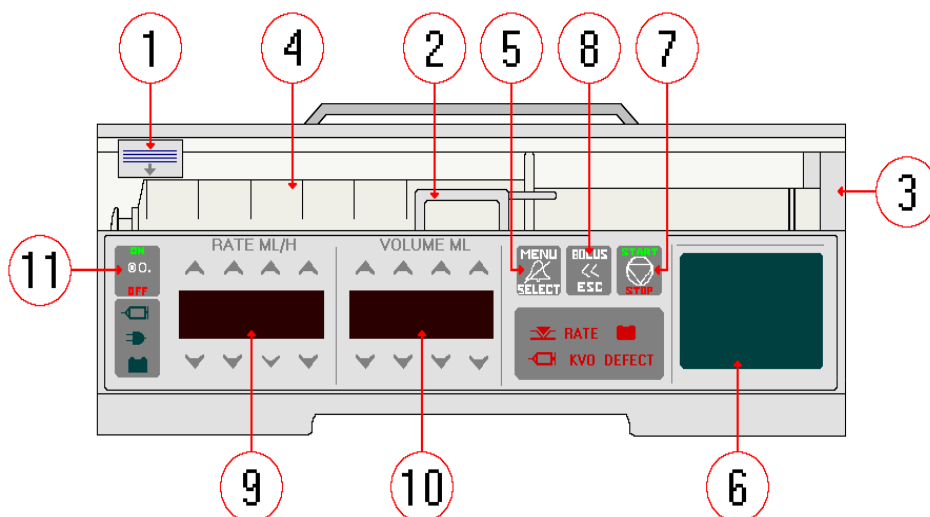

- ✓ کلید (۱) را به سمت پایین فشرده تا در باز شود.
- ✓ کلمپ را به سمت بالا کشیده (۲) صبر کنید تا حرکت کند (۳).
- ✓ سرنگ را در قسمت (۴) قرار داده (مطمئن شوید تا لبه پیستون سرنگ شیار را پر کند به نحوی که برجستگی های لبه سیلندر سرنگ در دو طرف واقع شود).
- ✓ کلمپ سرنگ را فشار داده تا در حالت صحیح قرار گرفته در را ببندید (۲).
- ✓ کلید BOLUS/ESC (۸) را فشار داده و نگهدارید.
- ✓ کلید SELECT (۵) را فشار داده تا سرنگ انتخاب شده روی صفحه نمایش را تایید کنید.
- ✓ etar مورد نظر را با استفاده از کلید RATE ML/H بر روی پنجره (۹) انتخاب کنید.
- ✓ حجم مورد نظر را با استفاده از کلید VTBI بر روی پنجره (۱۰) انتخاب کنید.
- ✓ برای شروع و توقف تزریق کلید START/STOP (۷) را فشار دهید.
- ✓ جهت خاموش کردن دستگاه کلید ON/OFF (۱۱) را فشرده و ۲ ثانیه نگهدارید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران