

سرنگ پمپ ARGUS 600

- تزریق به سه روش انجام می شود:

روش اول:

دستگاه را روشن کرده **Rate** را وارد می کنیم: مثلا ۴۰ سی سی در ساعت (عدد ۱۰ را ۴ با فشار دهید).
Start را فشار دهید.

روش دوم:

دستگاه را روشن کرده **Rate** را وارد می کنیم: مثلا ۴۰ سی سی در ساعت (عدد ۱۰ را ۴ با فشار دهید).
دکمه **Mode** را فشار دهید تا چراغ روبروی **tot ml** روشن شود.
حجم دلخواه را وارد کنید: مثلا ۲۰ سی سی (عدد ۱۰ را ۲ بار بزنید).
Start را فشار دهید.

روش سوم:

دستگاه را روشن کرده دکمه **Mode** را فشار دهید تا چراغ روبروی **tot ml** روشن شود. سپس حجم مورد نظر را وارد کنید: مثلا ۵۰ سی سی (عدد ۱۰ را ۵ بار بزنید).
دکمه **Mode** را فشار دهید تا چراغ روبروی زمان روشن شود. سپس زمان مورد نظر را وارد کنید: مثلا ۲ ساعت (عدد ۱۰ را ۲ بار بزنید).
Start را ۲ بار فشار دهید.



جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران