

ساکشن BICAKCILAR

(۱) قرار گرفتن فیلتر ما بین دستگاه و باطل ساکشن به شکلی که قسمت شیشه ای فیلتر به سمت باطل و قسمت مات فیلتر به سمت دستگاه باشد .

(۲) ابتدا از بودن شناور بر روی درب باطل اطمینان حاصل نمایید ، تا مایعات وارد دستگاه نشود .

(۳) دستگاه را به برق شهر وصل کنید .

(۴) با چرخاندن ولوم روی دستگاه به سمت موافق عقربه های ساعت دستگاه روشن می شود و اگر ولوم را به همان جهت ادامه دهیم مقدار مکش افزایش می یابد و بالعکس .

(۳) جهت افزایش و کاهش مقدار مکش ، توسط ولوم فشار تنظیم نمایید .

(۴) باطل ها و درب ساکشن را توسط موادی که فاقد فنل استریل می باشند را استریل نمایید .

(۵) پس از استفاده دستگاه را خاموش نمایید .



جهت اطلاعات بیشتر به راهنمای کاربری دستگاه مراجعه نمایید



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران