


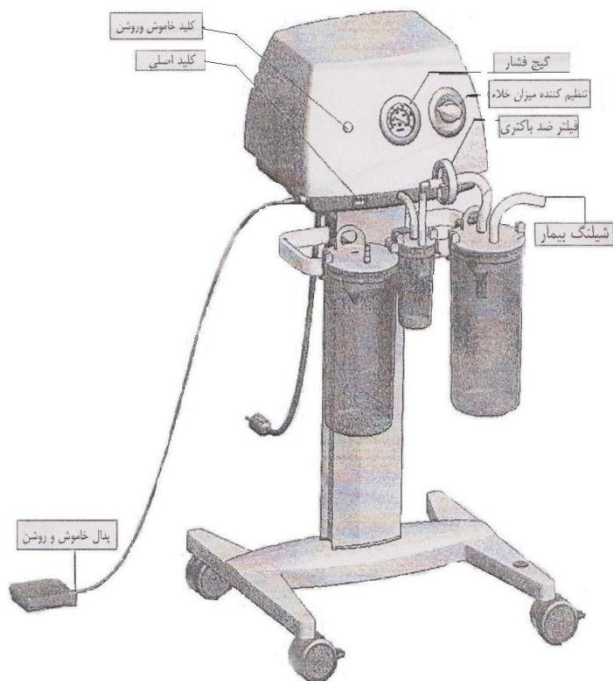

سازمان بهداشت و ایمنی کار

ساکشن صایران

با اتصال دوشاخه کابل برق به پریز و روشن کردن کلید اصلی، LED سبز رنگ کلید Push button روی دستگاه به حالت چشمک زن در می آید. با فشار دکمه **ON/OFF** (Push button) الکتروپمپ شروع بکار کرده و همزمان LED سبز رنگ دائما روشن میماند. سپس میزان وکیوم را توسط رگولاتور (تنظیم کننده مقدار فشار) تنظیم نمایید. پس از کسب اطمینان از صحت اتصالات شیلنگ های رابط و جارها و فیلتر، لوله بیمار را وصل نمایید. با فشار مجدد دکمه **ON/OFF** (Push button) دستگاه خاموش شده و LED سبز رنگ مجدداً به حالت چشمک زن در می آید. این کار در مواقع لازم توسط پدال و بدون استفاده از دست نیز قابل انجام است. نحوه اتصالات شیلنگ ها و قطعات جانبی دستگاه در شکل زیر آورده شده است.



نکات قابل توجه جهت استفاده از دستگاه ساکشن

- جهت حمل ساکشن از دسته ی آن استفاده کنید .
- چنانچه پس از پر شدن جارها نسبت به تخلیه ی آنها اقدام نشود، امکان ورود مایعات به داخل دستگاه ساکشن وجود دارد و این موجب آسیب رسیدن به دستگاه می شود .
- از لوازم جانبی یکبار مصرف مانند شیلنگ بیمار و ... استفاده مجدد نکنید.
- سیستم پمپ دستگاه ساکشن نیاز به هیچ گونه روغنکاری ندارد قبل از استفاده از دستگاه براساس نوع کاربرد، رگولاتور را تنظیم نمایید.
- عدم تنظیم صحیح رگولاتور (تنظیم وکیوم بیش از حد مورد نباعث بروز آسیب جدی برای بیمار میشود.
- عدم استفاده از فیلتر باکتری، باعث ایجاد آلودگی های محیطی و انتشار بیماری ها میشود.
- هرگز ظروف و یا بسته های حاوی مایعات را بر روی ساکشن قرار ندهید. در صورتی که مایعی بر روی آن ریخت، سریعاً دستگاه را خاموش کرده، آن را تمیز کنید. پس از حصول اطمینان از خشک بودن دستگاه، آن را روشن نمایید.
- از لوازم جانبی معیوب یا شکسته استفاده ننمایید.
- جهت تخلیه جارها لازم است در ابتدا گپ جار را توسط دستگیره تعبیه شده بر روی آن برداشته و سپس جار را از هولدر مربوطه با حرکت عمودی به سمت بالا جدا نمایید. لازم است پس از تخلیه گپ و قطع کن مخروطی شکل حتماً تمیز شده و سپس در جای خود قرار گیرد.
- استفاده از این دستگاه در بخش نوزادان ممنوع می باشد .

جهت اطلاعات بیشتر به راهنمای کاربری دستگاه مراجعه نمایید



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران