

## الکتروشوک NIHON KOHDEN

( ۱ ) اتصال دستگاه به برق شهر

( ۲ ) روشن کردن دستگاه از طریق SELECTOR روی دستگاه

( ۳ ) با چرخاندن یک درجه SELECTOR دستگاه به چپ روی گزینه مانیتور قرار می گیریم و می توانیم بیمار را از طریق کابل ECG متصل به دستگاه مانیتورینگ قلبی کنیم ( در صورت متصل نبودن LEAD ها پیغام CHECK ECG ELECTROD نمایش داده می شود . )

( ۴ ) از طریق دکمه LEAD ، کانال های ECG را انتخاب می کنیم و از طریق دکمه SENS دامنه یا ارتفاع ECG را انتخاب می کنیم ، دکمه نارنجی رنگ روی دستگاه SILENT دستگاه می باشد و چهارمین دکمه ALARM SET UP است و محدوده ALARM ها را می توانیم مشخص کنیم .

( ۵ ) اگر SELECTOR را دو درجه به سمت چپ بچرخانیم روی AED MODE قرار می گیرد و در زمانی استفاده می شود که پد اکسترنال به بیمار متصل باشد ، با چرخاندن بقیه درجات SELECTOR میزان ژول مورد نظر را انتخاب می کنیم .

( ۶ ) شارژ کردن پدل ها از طریق فشردن دکمه شماره ۲ و دشارژ ( تخلیه ) شوک از طریق دکمه شماره ۳

\* دستگاه به صورت اتوماتیک هنگام شوک دادن پرینت می گیرد .



جهت اطلاعات بیشتر به راهنمای کاربری دستگاه مراجعه نمایید



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران