

نبولایزر (جنرال)



این دستگاه جهت تبدیل داروها به قطرات ریز (نبولایز کردن) برای رفتن داروها به آلوئول ها و تاثیر موضعی آن استفاده می شود.

آماده کردن دستگاه:

پریز دستگاه نبولایزر را به برق وصل نمایید. (از سالم بودن آن مطمئن باشید). درب نبولایزر را باز کنید.

قسمت سرنبولایزر را توسط رابط به دستگاه وصل کنید. سر نبولایزر را با چرخش به سمت راست و کشیدن آن به سمت بالا از هم جدا کنید. در داخل قسمت پایین، پروانه ی کوچکی (بخار ساز) وجود دارد که حتما باید سالم باشد. (پروانه راحت برداشته شده و قابل شستشو است) داروی مورد نظر را داخل دستگاه بریزید. دو قسمت جدا شده سر را دوباره به هم وصل کنید. قسمت دهانی را در چند سانتیمتری دهان و بینی بیمار قرار دهید و دکمه power را روی on قرار دهید.

بعد از اتمام کار دستگاه را خاموش کرده (دکمه power را روی off قرار دهید) و آن را از برق جدا کنید. قسمت سر دستگاه را از هم جدا کنید قسمت بالایی را شسته و خشک کنید و قسمت پایینی را با گاز تمیز خشک نمایید. (پروانه را نیز خشک کرده در محل خود قرار دهید) رابط را جمع نموده با سر نبولایزر داخل دستگاه قرار دهید و درب آن را ببندید.

در صورت نداشتن بخار بعد از طی مراحل قبل به نکات زیر توجه فرمایید :

- از روشن بودن دستگاه مطمئن شوید.
- رابط نبولایزر دچار پیچ خوردگی نباشد.
- پروانه درست کار کند.
- انسدادی در قسمت بالایی سر نبولایزر نباشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران