



سازت دانشگاه علوم پزشکی تهران

## دستگاه هیومدیفایر Fisher & Paykel، مدل MR810

نمایندگی انحصاری: شرکت شالچیلار، تلفن: ۸۸۸۹۳۳۱۱ (ده خط)

این دستگاه بمنظور گرم و مرطوب نمودن گازهای تحویلی به بیمار در حین ونتیلاسیون یا سایر فرآیندهای کمک تنفسی استفاده می‌شود.

### مراحل آماده سازی دستگاه

۱. ابتدا چمبر را بر روی دستگاه قرار داده و آنرا تا سطح مشخص شده بر روی دیواره از آب پر کنید

۲. لوله‌های خرطومی را به چمبر متصل کرده و در صورت وجود هیتر وایر، آنرا به آداپتور هیتر وایر دستگاه وصل کنید

۳. دستگاه را به برق متصل نموده و آنرا روشن کنید.



۴. سطح حرارت مطلوب را تنظیم کنید (حرارت در سه سطح قابل تنظیم است).

این دستگاه در دو مود قابل استفاده می‌باشد:

۱- بدون هیتر وایر: در صورت عدم استفاده از هیتر وایر در ست لوله، دما در سطح تنظیمات انتخابی به صورت ثابت حفظ می‌شود و تغییرات دمای محیطی هیچگونه تاثیری در تنظیمات ندارد.

۲- با هیتر وایر: در صورت استفاده از ست لوله مجهز به هیتر وایر، تغییرات دمای محیطی در تنظیمات دمای سیستم لحاظ می‌گردد.



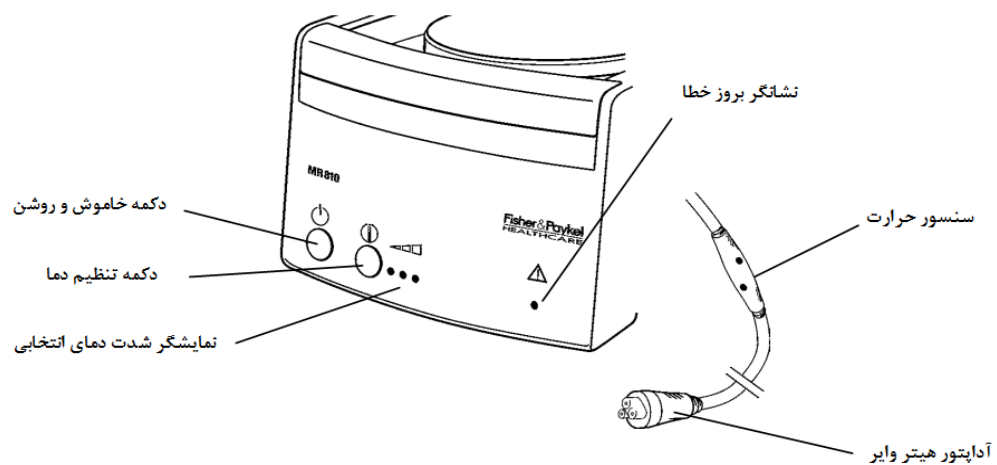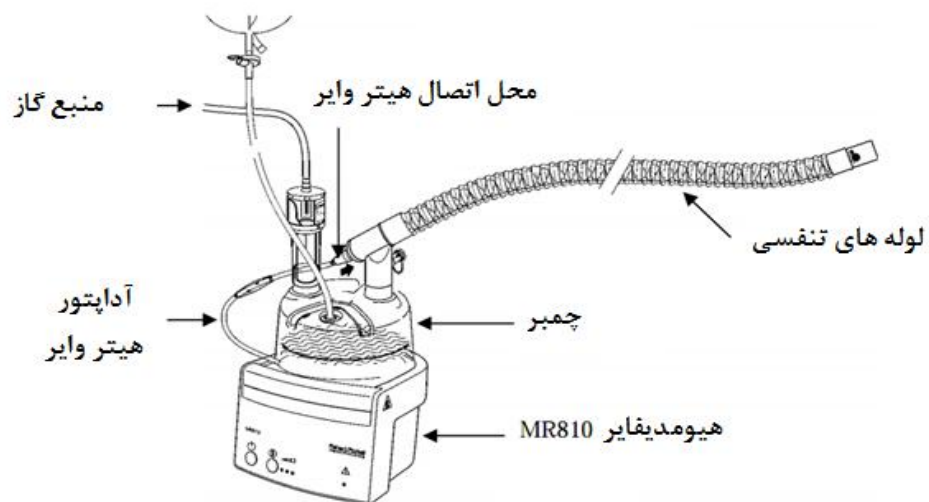

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.