

راهنمای سریع کاربری بالون پمپ داخل آنورتی

CS۱۰۰/CS۱۰۰i

- ۱- دستگاه را به برق وصل کرده و دکمه Power را بزنید
- ۲- سیلندر هلیوم را باز کرده و فشار آنرا چک کنید
- ۳- کابل‌های فشار و ECG بیمار را به دستگاه وصل کنید
- ۴- ترانسدیوسر را به روش زیر صفر نمایید
الف- سه راهی متصل به دام و ترانسدیوسر را بطرف هوا باز کنید
- ب - کلید Zero Pressure را بمدت دو ثانیه فشار دهید
پ - سه راهی را مجدداً به وضعیت اولیه برگردانید
- ۵- مطمئن شوید که دستگاه در حالت کاری Auto قرار داشته باشد
- ۶- کانتر و extension را به محل مربوطه روی Safety Disk متصل نمایید
- ۷- برای شروع کار بالون دکمه Start را فشار دهید تا بالون پمپ پس از انجام عمل Autofill که چند ثانیه طول می‌کشد، کار پمپ را شروع کند.
- ۸- بررسی نمایید که مقدار Aug Alarm نوشته شده در گوشه راست- پایین صفحه نمایش حدود ۱۰mmHg کمتر از مقدار فشار Aug قرار داشته باشد.