



سازت دانشگاه علوم پزشکی تهران

مانومتر اکسیژن دیواری

پیش از استفاده از عدم وجود نشتی در شلنگ و سایر اتصالات مطمئن شوید

مطمئن شوید اتصال به آنتل دیوار با کانکتور از نوع مناسب و به صورت صحیح انجام شده و اتصال دچار شلی یا لق شدگی نمی باشد.

مطمئن شوید که توپ لغزان در داخل مانومتر گیر نکرده و پیش از باز کردن اکسیژن روی پائین ترین درجه قرار دارد. در غیر اینصورت احتمالاً فلومتر دچار نشتی می باشد در اینحال با واحد مهندسی تماس بگیرید

موادی نظیر لوبریکانت، روغن و مواد اشتعال زا و آتش زا در مجاورت فلومتر قرار ندهید و در معرض دود سیگار و یا سایر مواد دودزا قرار نگیرد

برای افزایش درجه: پیچ را در جهت عقربه های ساعت بپیچانید

برای کاهش درجه: پیچ را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید

زیاد چرخاندن دستگاه موجب آسیب به دستگاه می شود.

برای تمیز کردن فلومتر از یک پارچه نمناک استفاده کنید و از استریل گازی استفاده نکنید. دستگاه را در آب یا سایر مایعات غوطه ور نسازید



جهت اطلاعات بیشتر به راهنمای کاربری دستگاه مراجعه نمایید



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران