



سازت دانشگاه علوم پزشکی تهران

## اتوکلاو تکنوگاز

۱. با زدن کلید on دستگاه را روشن کنید.
۲. از پر بودن پمپ آب دستگاه مطمئن شوید. اگر دکمه pump قسمت Exhaust Tank روشن باشد تانک تخلیه کافیسست و نیازی به تخلیه آن نیست.
۳. اگر چراغ max دکمه Level Water Tank روشن باشد تانک پمپ دستگاه پر است. در صورتیکه چراغ min روشن باشد دستگاه نیاز به پر شدن مجدد آب مقطر دارد.
۴. پگ ها را حتما از سمت شفاف روی طبقات قرار دهید..
۵. درب دستگاه را ببندید..
۶. برنامه مورد نظر خود را با زدن دکمه select انتخاب کنید.
۷. کلید start را بزنید.
۸. بعد از نمایش دکمه End و اعلام بوق ممتد پایان، دستگاه را باز کنید.
۹. وسایل را به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه خارج نکنید. تا کاملا بخار دستگاه خارج و پگها خشک شوند.
۱۰. توجه کنید که حجم دستگاه محدود بوده و از گذاشتن پگها به تعداد زیاد و فشرده در آن اکیدا خودداری فرمایید.



سازت دانانگاه علوم پزشکی تهران

جهت كسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نماييد .