

پروسسور Hope

۱. ابتدا کلید برق ورودی تابلو برق را روشن کنید .
۲. کلید START پروسسور را روشن کنید.
۳. بعد از یک دقیقه که دستگاه گرم شد و آماده دریافت فیلم گردید در اتاق تاریکخانه وارد شوید.
۴. چراغ قرمز را روشن کنید.
۵. درب کاست را باز کرده از محل ورود فیلم به دستگاه پروسسور، فیلم را داخل پروسسور می گذاریم.
۶. بعد از یک دقیقه از خروجی دستگاه که در بیرون اتاق قرار دارد فیلم را دریافت می کنیم .





سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران