

فلوروسکوپي SHIMATZU



در صورتی که دستگاه تازه روشن شده است، پیش از انجام آزمون هایی که با شرایط اکسپوزر بالا انجام می شود دستگاه را warm up کنید.

برای انتخاب شرایط اکسپوزر از جدول راهنمای نصب شده در کنار کنترل پانل کمک بگیرید.

هرگز کاست های خام و یا تابش دیده را در خارج از پاس کاست قرار ندهید.

کمر بند و سایر اشیا فلزی را از لباس بیمار جدا کنید چراکه باعث ایراد خدشه به رویه تخت می شود.

در هنگام فلوروسکوپي از روش پالسی (زمان کوتاه) استفاده کنید و هرگز پیوسته فلوروسکوپي را انجام ندهید.

پیش از انتخاب فریم ها بویای پرینت حتما با دستیار مربوطه هماهنگ کنید تا از اسراف فیلم جلوگیری شود.

در هنگام برگرداندن تخت از حالت ایستاده به خوابیده (یا بالعکس) اشیاء اضافی مانند چهارپایه و... را از مسیر تخت خارج کنید.

چنانچه از کاست استفاده می کنید مراقب باشید که مارکر یا کاست در بخش زیرین تخت نیفتد.

برای راهنمایی مریض از میکروفون استفاده کنید و صدای اتاق را باز بگذارید تا بتوانید صدای مریض را بشنوید.

در هنگام روشن بودن دستگاه حتما از تهویه استفاده کنید.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران