

الکتروکاردیوگراف CARDIOLINE

نماینده‌گی انحصاری: شرکت داوین سا ، تلفن: ۲۲۹۰۶۶۳۵



(۱) اتصال دستگاه به برق شهر

(۲) روشن کردن Power دستگاه از طریق کلید 0 - 1

(۳) روشن کردن دستگاه از طریق کلید ON روی دستگاه

(۴) انتخاب MODE مورد نظر از طریق فشردن دکمه

(۵) انتخاب LEAD مورد نظر از طریق فشردن دکمه START جهت گرفتن ECG

(۶) جهت شارژ شدن دستگاه باید کلید 0 - 1 و Power روشن بوده اما کلید OFF روی

دستگاه خاموش باشد در اینحال روی دستگاه کلمه Sharging نمایش داده می شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر چه راهنما رجوع نمایید.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران