

الکتروکاردیوگراف Carewell-1103B

شرکت نمایندگی:

راهنمای کلیدها:

- ۱- **Mode**: جهت انتخاب حالت ثبت اتوماتیک (Auto) یا دستی (Manual).
- ۲- **Reset**: کلید reset کردن ثبت سیگنال.
- ۳- **1mv**: کلید تنظیم دامنه سیگنال.
- ۴ و ۵- **lead**: کلیدهای تنظیم لیدها.
- ۶- **Run/stop**: کلید ثبت سیگنال یا توقف آن.
- ۷- **Filter**: جهت فعال یا غیرفعال نمودن فیلتر برق شهر.
- ۸- **menu**: میتوان تنظیماتی نظیر سرعت، حساسیت؛ فیلتر، تاریخ و پرینت دستگاه را تغییر داد.
- ۹- **On/off**: کلید روشن یا خاموش کردن دستگاه.

نحوه راه اندازی دستگاه:

- ۱- ابتدا کابل برق را وصل کنید.
 - ۲- دکمه on/off دستگاه را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.
 - ۳- کابل بیمار را به دستگاه وصل کنید.
 - ۴- لیدها را به بیمار اتصال دهید.
- توجه داشته باشید بیمار باید فاقد هرگونه وسیله فلزی اعم از سکه یا وسیله زینتی به خصوص گردنبند و دستبند باشد
 - حال به بیمار گوشزد کنید که ثابت و بدون حرکت باشد تا شما نوار را تهیه کنید
- ۵- با فشردن کلید Run تست را تهیه کنید.

SoleStocks



جهت اطلاعات بیشتر به راهنمای کاربری دستگاه مراجعه نمایید



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران