



الکتروکار دیوگراف داوینسا

نمایندگی انحصاری: شرکت داوینسا، تلفن: ۲۲۲۲۸۸۴۳-۲۲۹۰۶۶۳۵



برای گرفتن نوار قلب کامل از ۶ لید سینه ای و ۴ لید اندامی استفاده می شود.

ON/OFF: این کلید در پشت دستگاه قرار

دارد با فشردن آن به سمت پایین دستگاه

روشن می شود.

Power: با چند ثانیه فشار دادن این دکمه دستگاه آماده تنظیم می شود.

Mode: این دکمه روش گرفتن نوار را مشخص می کند. با هر بار فشردن آن به گزینه بعد می

روید؛ اگر **Auto** روشن باشد دستگاه به صورت اتوماتیک نوار را می گیرد؛

در حالت **Man** نوار بصورت دستی گرفته میشود و برای رفتن به لیدهای دیگر باید از دکمه

Hold استفاده نمود.

فیلتر: میزان موج های اضافی دستگاه را مشخص می کند که باید روی گزینه دوم باشد .

دامنه: توسط این دکمه دامنه شکل موج قابل تنظیم است .



سازمان ملی استاندارد و سنجش ایران

Rate (mm/s): سرعت حرکت نوار را مشخص می کند که در حالت عادی روی ۲۵ و در

برادی‌کاردی روی ۵۰ و در تاکی‌کاردی روی ۵ قرار می دهیم.

OL: تعداد ضربان قلب را نشان می دهد.

بعد از گذاشتن لیدها رابط را به دستگاه وصل نموده و با فشردن دکمه **Power** و گذاشتن روی

Mode مشخص نوار را بگیرید.

توجه: رول نوار را باید در محل خود به صورتی قرار دهید که سمت خط کنشی شده آن رو به مداد

دستگاه باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید