



سازت دانشگاه علوم پزشکی تهران

## ماشین بیهوشی Drager Fabius

- ۱- کابل دستگاه را به برق وصل کنید .
- ۲- دکمه ON/OFF در پشت دستگاه را در حالت ON می گذاریم.
- ۳- Outlet های دستگاه را وصل می کنیم: سفید: O<sub>2</sub> آبی: N<sub>2</sub>O
- ۴- برای کالیبره کردن دکمه - -۰- را فشار دهید.
- ۵- بر روی فشار دلخواه کلیک کنید و منتظر بمانید.
- ۶- سیستم تنفسی را به دستگاه وصل کنید.
- ۷- از نظر نشتی دستگاه و سیستم را چک کنید .

### Manual Mode:

- A : دکمه مربوط به آن را فشار دهید و تایید نمایید.
- B : در قسمت APL (والو) دریچه تبدیل را روی MAN قرار دهید.
- C : والو را به اندازه دلخواه باز یا بسته کنید.

### Spont Mode:

- A: دریچه تبدیل را روی Spont قرار دهید.
- B: برای این مد دکمه خاصی وجود ندارد.

### IPPV Mode:

- A : TV و RR مناسب را تنظیم کنید.
- B : دکمه IPPV را فشار دهید و تایید نمایید.
- C: دریچه تبدیل را روی IPPV بگذارید.

### Manual حالت برگرداندن به حالت

- A: دکمه MAN را فشار دهید و تایید کنید.

B: در یچه تبدیل را روی MAN بگذارید.

C: والو را به اندازه دلخواه باز یا بسته کنید.

### خاموش کردن دستگاه:

A: اکسیژن را می بندیم.

B: دکمه power را فشار داده و تایید کنید.

C: باید below دستگاه پایین بیاید.

D: کلید OFF / ON را در حالت OFF بگذارید.

E: کابل دستگاه را از برق جدا کنید.



جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید .



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران