

## پمپ سرنگ TERUMO TE331

برای قرار دادن سرنگ:  
کلامپ را تا آخر بالا بکشید.  
کلامپ را به آسانی جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید . نیازی به فشار اضافی نمی باشد. توجه کنید: اگر راحت نمی چرخد کلامپ را تا آخر بالا نبرده اید؛  
هرگز فشار زیاد نیاورید.  
کلامپ را تا نود درجه چرخانیده دستگاه آماده جاگذاری سرنگ است.  
کلاچ روی اسلایدر را گرفته و تا جایی که پیستون سرنگ نیاز دارد به عقب بکشید .  
توجه نمائید زبانه های روی اسلایدر کاملاً " باز می شوند تا انتهای پیستون سرنگ در آن قرار گیرد.  
تنظیم فلو با استفاده از چرخ گردان مغناطیسی انجام میشود.  
تنظیم سرعت تزریق :  
دستگاه در حال stop باشد. بوسیله چرخ گردان dial در سمت راست:  
زیر 100cc در ساعت با مقادیر 0.1cc و بالای 100cc در ساعت با مقدار 1cc در ساعت می توان میزان فلو را تغییر داد.  
اگر همزمان کلید stop را نگهدارید سرعت تغییر فلو افزایش می یابد.  
قبل از پاک کردن از برق کشیده شود.  
در صورت خیس شدن و یا ریختن مایع با گاز و یا پارچه خشک شود



جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید .



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران