

پمپ سرنگ MEDIMA

- ✓ دکمه on بر روی پنل دستگاه را فشار داده تا دستگاه روشن شود.
- ✓ سرعت تزریق بر حسب ml/h را توسط صفحه کلید اعداد وارد کنید و کلید YES را فشار دهید.
- ✓ در صورت نیاز، مقدار حجم تزریق را بر حسب ml وارد کنید.
- ✓ با زدن کلید Yes به صورت پیوسته مقادیر مربوطه را تایید تا از منوی تنظیمات خارج شوید.
- ✓ سرنگ را در جای مربوطه قرار داده (سایز سرنگ مشخص شده در پایین صفحه LCD با سایز سرنگ مورد استفاده یکسان باشد).
- ✓ کلید <<< را فشار دهید تا دستگاه به صورت اتوماتیک سرنگ را بارگذاری کند.
- ✓ در صورت اعمال صحیح مراحل ذکر شده در بالا عبارت READY بر روی صفحه نمایشگر مشخص می شود.
- ✓ دکمه START را فشار دهید.
- ✓ سوزن را به داخل بدن مریض وارد نمایید و مطمئن شوید که در مسیر تزریق حباب هوا وجود ندارد.
- ✓ دستگاه را با نگه داشتن کلید خاموش به مدت ۳ s خاموش نمایید.



جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران