



سازمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

## ساکشن دیواری



### Amvex ساکشن دیواری

دستگاه دارای یک صفحه نمایشگر یک پیچ تنظیم و سوئیچ تنظیم  
مود دستگاه است.

حالت خاموش: قطع و کیوم



انجام ماکزیمم و کیوم



حالت:full



امکان انتخاب میزان و کیوم:REG حالت  
توسط پیچ تنظیم

تست دستگاه: ۱- دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید. پیچ را در جهت عقربه های ساعت بصورت کامل بچرخانید و سپس شلنگ خروجی را مسدود کنید در اینحال روی نمایشگر نباید عددی را نمایش دهد

۲- دستگاه را در حالت متناوب قرار دهید و پیچ تنظیم را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید در اینحال هم نباید عدد نمایشگر تغییری کند.

۳- شلنگ را مسدود کنید و سپس آنرا به آرامی باز و بسته کنید تا مقادیر مختلفی روی نمایشگر مشاهده نمائید مطمئن شوید در حالت انسداد عدد نمایش داده شده روی صفحه ثابت و بدون نوسان است

۴- و کیوم را کم کنید تا به صفر برسد و سوئیچ را در حالت خاموش قرار دهید شلنگ را مسدود کنید و مطمئن شوید نمایش نمایشگر بالاترین عدد ممکن را نمایش میدهد.

۵- سوئیچ را در حالت متناوب قرار دهید فشار را کاهش دهید و به صفر برسانید و سپس دستگاه را خاموش کنید

در حالت متناوب شلنگ و کیوم را مسدود کنید و پیچ تنظیم را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا مطمئن شوید که حد ساکشن کمتر از ۲۱- کیلوپاسکال یا ۱۶۰- میلی متر جیوه برای کودکان و برای نوزادان ۱۳- کیلوپاسکال یا ۱۰۰- میلی متر جیوه برای نوزادان نشود. نکته: پیش از استفاده کاملاً طبق دستورالعمل مندرج در راهنمای کاربری دستگاه را تمیز و ضدعفونی نمائید و مطمئن شوید اتصالات به درستی نصب شده اند.

جهت اطلاعات بیشتر به راهنمای کاربری دستگاه مراجعه نمائید



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران