



سازمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

مونیتور VISTA

- کلید خاموش و روشن: این کلید مانیتور را خاموش یا روشن می کند. برای خاموش کردن مانیتور لطفاً این دکمه را فشرده و برای بیش از 2 ثانیه نگه دارید.
- MAIN:** برای خارج شدن از منویی که در حال حاضر در حال نمایش است و بازگشت به صفحه نمایش اصلی این دکمه را فشار دهید.
- FREEZE:** این دکمه برای ثابت کردن شکل موج ها و همچنین خروج از این حالت به کار می رود.
- SILENCE:** شما می توانید با فشردن این دکمه در آلام صوتی وقفه ایجاد کرده، مانیتور را بی صدا کنید و یا آلام ها را پاک نمایید. همچنین می توانید بین حالات آلام مختلف از طریق این دکمه تغییر وضعیت دهید.
- REC:** برای شروع یا پایان دادن به پرینت گرفتن این دکمه را فشار دهید.
- NIBP:** برای شروع یا پایان دادن به اندازه گیری فشار خون غیر تهاجمی این دکمه را فشار دهید.
- MENU:** با فشار دادن این دکمه منو نمایش داده می شود.
- این دستگاه را در مجاورت گازهای بیهوشی قابل اشتعال، مواد، مایعات و بخارات قابل انفجار به کار نبرید.
- تنظیمات آلام طبق موقعیت خاص بیمار انجام داده شود و از اینکه صدای آلام هنگام وقوع آلام فعال می شود، اطمینان حاصل گردد.
- اگر برای مدت طولانی نمی خواهید از دستگاه استفاده کنید یا آنرا به برق وصل کنید، باتری را از دستگاه خارج نمایید.
- وسایل یک بار مصرف تنها برای یک بار استفاده ساخته شده اند. نباید از آنها استفاده مجدد کرد زیرا کارایی آنها پایین آمده و احتمال وقوع آلودگی وجود دارد.



جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران