

دسنگاه ونتيلاتور Bennett، مدل 760

نماینده انحصاری: شرکت شالچیلار، تلفن: ۸۸۸۹۳۳۱۱ (ده خط)



مراحل آماده سازی دستگاه ونتیلاتور

- ۱- کابل دستگاه را به برق متصل نمایید
- ۲- شلنگ تغذیه اکسیژن را به Outlet دیواری متصل کنید.
- ۳- ست لوله های تنفسی را به همراه هیومدیفایر و فیلتر باکتری روی دستگاه سوار کنید.

شروع کار با دستگاه

- ۱- ابتدا دستگاه را بوسیله کلید ON/OFF تعبیه شده در پشت دستگاه، روشن کنید.
- ۲- طبق دستور پزشک یکی از مدهای تنفسی SIMV، SPONT یا A/C را انتخاب کنید.
- ۳- در هر مد تنفسی که انتخاب کرده اید، پارامتروهای که چشمک زن می باشند را به دستور پزشک تنظیم و کلید ACCEPT را برای اعمال تنظیمات بزنید.
- ۴- محدوده های آلارم را از Alarm Settings تنظیم نمایید.
- ۵- پس از چک نهایی، سه راهی (Y) را به تست لانگ جهت انجام تست و یا به بیمار جهت شروع ونتیلاسیون متصل کنید
- ۶- چنانچه یکی از آلارم های دستگاه فعال شد، با لمس کلید Alarm Silence 2 Min موقتاً آلارم صوتی را قطع و علت آلارم را بررسی و رفع نمایید

توجه فرمایید که دستور العمل مذکور در برگیرنده تمامی اطلاعات کاربری دستگاه نبوده و

جهت کسب اطلاعات بیشتر باید به **Operation Manual** دستگاه مراجعه نمود.